




84006142 / 84006143

Fotstöd Clean, Clean HRB, Clean 24"

Footrest Clean, Clean HRB, Clean 24"

Fußstütze Clean, Clean HRB, Clean 24"

78654A 2016-04-27

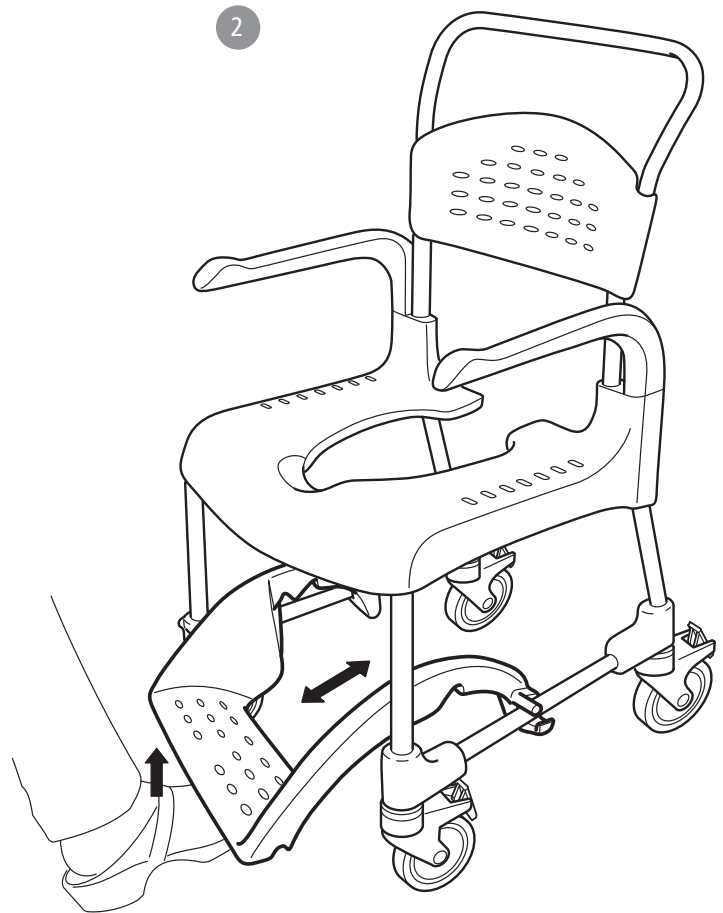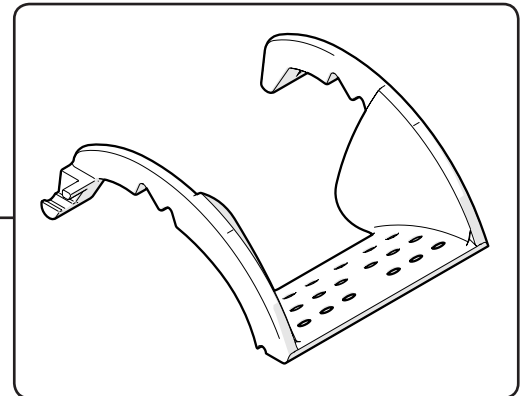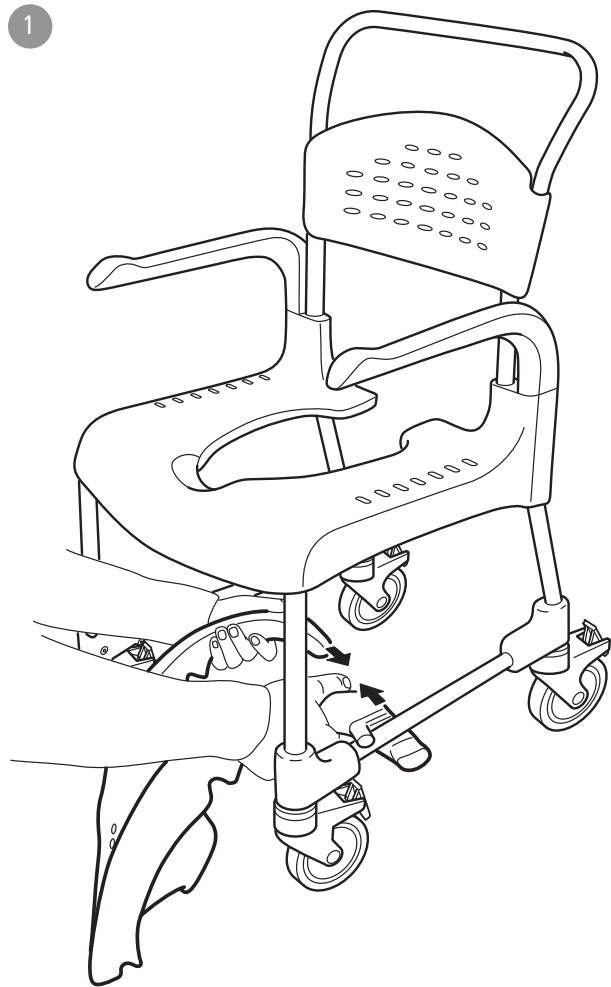

- sv** Fotstöd
1. Fotstödet är avtagbart.
 2. Vårdaren skjuter lätt in fotstödet med foten.

- en** Footrest
1. The footrest is detachable.
 2. The carer can easily push in the footrest with their foot.

- de** Fußstütze
1. Die Fußstütze ist abnehmbar.
 2. Der Betreuer kann die Fußstütze leicht mit dem Fuß einschieben.






Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 24 Anderstorp
www.etac.com

CE



Monteringsanvisning/Assembly instructions/Montageanweisung

Clean Höjdregerbar
Clean Height adjustable
Clean Höhenverstellbar

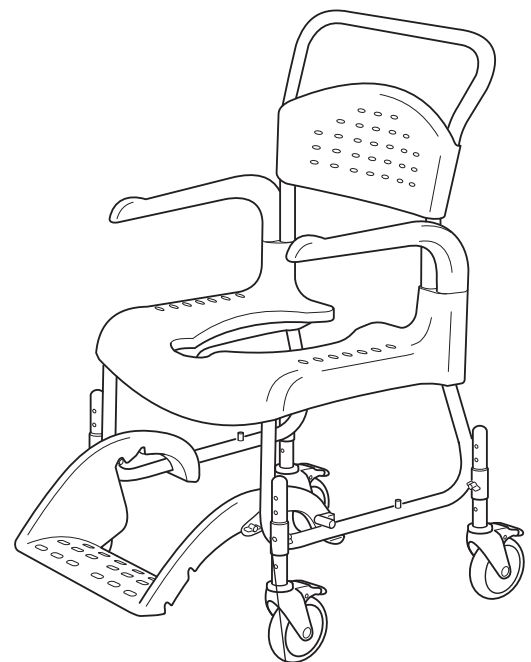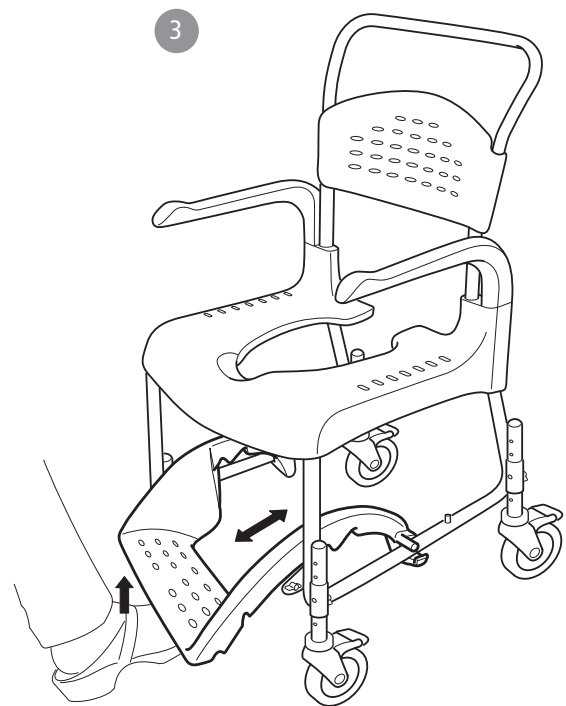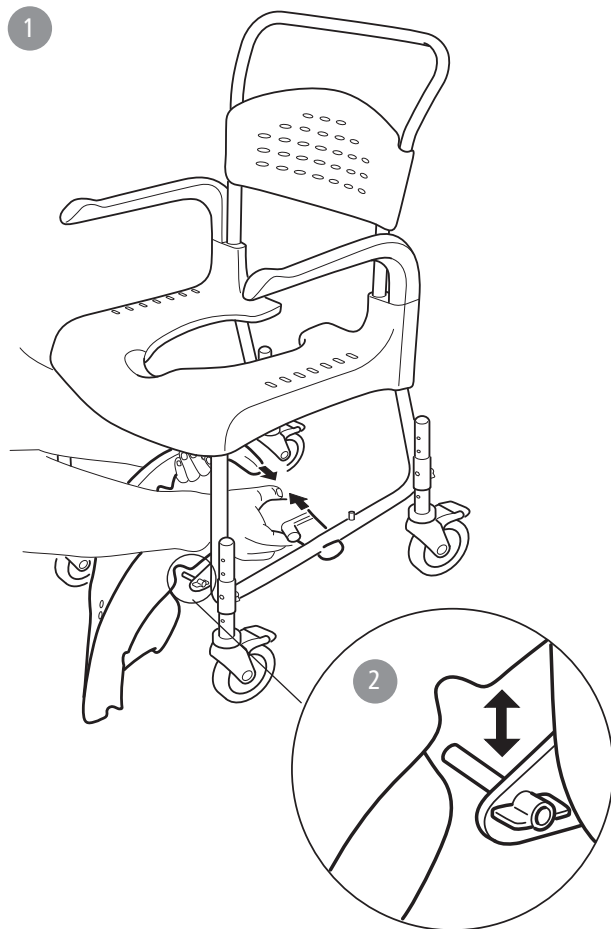

sv 1. Fotstödet är avtagbart.
2. Vid montering, se till att fotstödet läggs över låspinnen.
3. Vårdaren skjuter lätt in fotstödet med foten.
4. Fotstödet är justerbart i höjdl.

en 1. The footrest is detachable.
2. When remounting, make sure the footrest is positioned above the locking pin.
3. The carer can easily push in the footrest using his foot.
4. The footrest is adjustable in height.

de 1. Die Fußstütze ist abnehmbar.
2. Bei Einbau die Fußstütze über dem Sicherheitsstift einrichten.
3. Der Betreuer kann die Fußstütze einfach mit dem Fuß einschieben.
4. Die Fußstütze ist höhenverstellbar.